



EyeLite Vorgehen bei PC Austausch:

Sollte im Falle eines kompletten Datenverlustes, z. B. durch Diebstahl des PCs, Ausfall der Festplatte oder einem ähnlich schwerwiegendem Ausfall, eine Komplettwiederherstellung von EyeLite notwendig sein, installieren Sie EyeLite mit der "Option Wiederherstellung einer vorhandenen Datenbank".

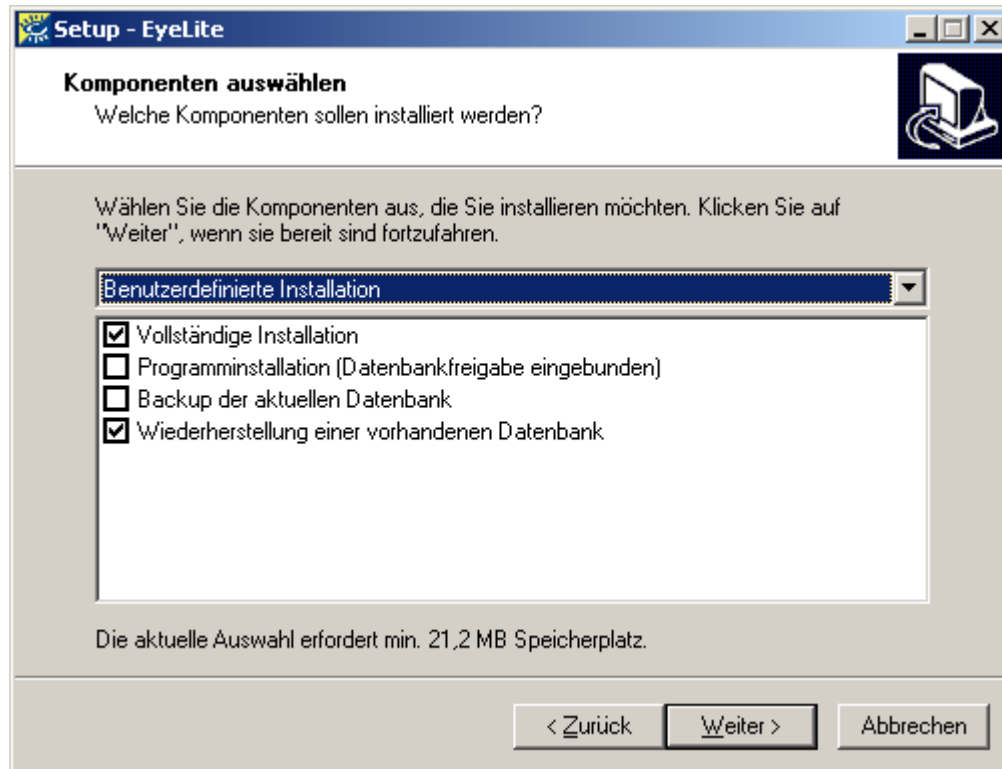

Vor dem Abschluss der Installation wird das EyeLite Datenbank Programm gestartet, bestätigen Sie dort mit „Weiter“ den Beginn und geben den Ordner an, in den Sie die Datensicherung vorgenommen haben bzw. die MPG&E-Anpassberatung Ihnen Ihre Daten zugesandt hat.

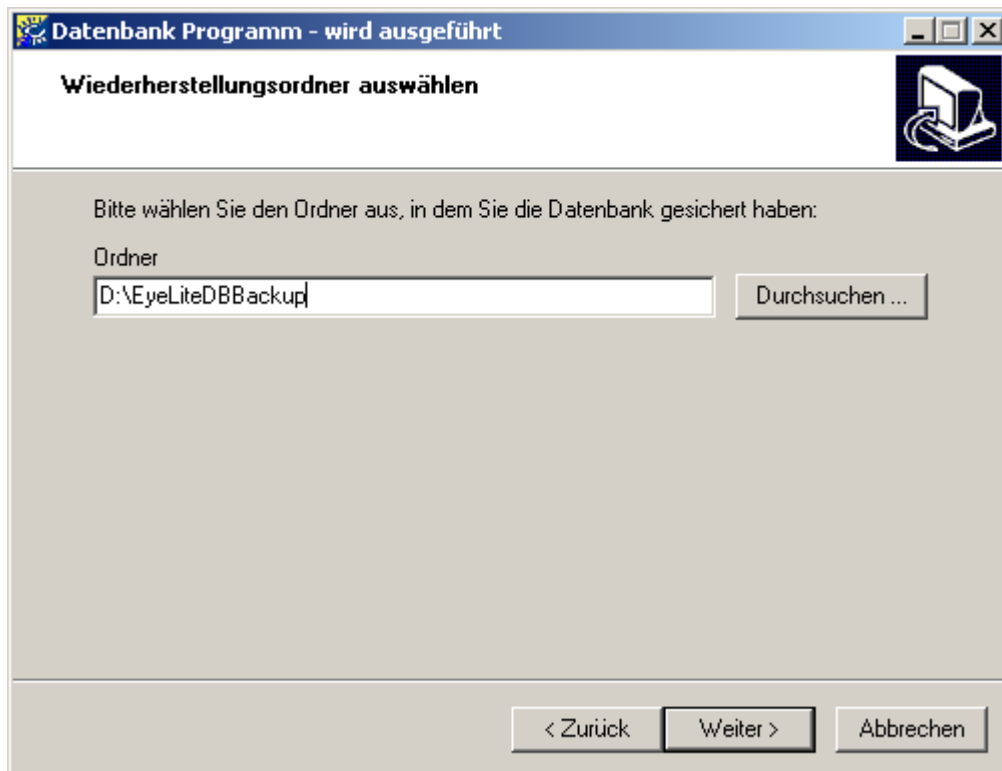

Folgen Sie den weiteren Instruktionen des Programms bzw. der Installation. Folgen Sie danach ggf. den Instruktionen zum „ersten Programmstart“. Ist dieser abgeschlossen, können Sie mit dem wiederhergestellten Datenbestand arbeiten.

Fragen und Kontakt

Wenn Sie weitere Fragen haben, finden Sie die Bedienungsanleitung in EyeLite, im Startmenü oder auf <http://www.mpge.de/service> oder wenden sich an:

MPG&E Handel und Service GmbH

Anpassberatung

Moorweg 105

24582 Bordesholm

Tel 04322 750-600 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 18.30 Uhr, Freitags von 8 - 17:30 Uhr)

Fax 04322 750-900

E-Mail: beratung@mpge.de

Website: <http://www.mpge.de>